

Self-sticking tender tape

SPITA

ResQ-plast®


PROFESSIONAL

- Nelepí se na pokožku, ochlupení a srst
- Trvale prodyšná
- Samolepící
- Nezpůsobuje alergii



- Trvale pružná
- Neobsahuje latex
- Odolná vůči olejům, nečistotám a mastnotě
- Plně funkční ve vodě

BEZBOLESTNÉ ODSTRANĚNÍ

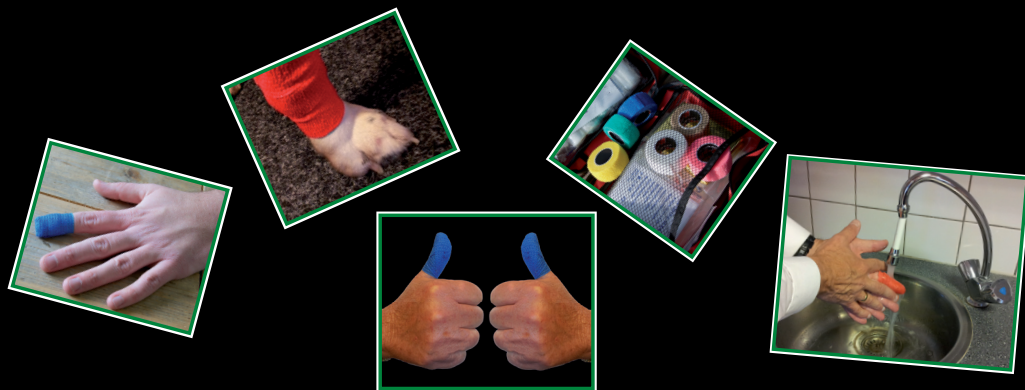

RYCHLÉ A JEDNODUCHÉ POUŽITÍ



Chcete-li z náplasti vytvořit na ránu polštářek, přeložte náplast několikrát přes sebe pro získání požadované tloušťky. Polštářek musí být dostatečně velký, aby krvácející ránu pokryl.



Položte polštářek na ránu, SPITA ResQ-plast mírně natáhněte, ránu opatrně obalte 4 až 5 vrstvami a náplast odtrhněte. Pro zakončení volný konec náplasti přitiskněte.





SPITA ResQ-plast®

Self-sticking tender tape



Univerzální samolepicí náplast vhodná na kůži!

Vzhledem k tomu, že **SPITA ResQ-plast** drží pouze sama na sobě, je snadno použitelná na vlhkou a/ nebo špinavou pokožku. V případě silného krvácení poranění můžete použít **SPITA ResQ-plast** přímo na ránu, abyste zastavili krvácení. Mírné natažení pásky způsobí dokonale přilnutí ploch k sobě. Náplast zůstává po celou dobu pružná a nebrání v pohybu vašich kloubů.

SPITA ResQ-plast je možné používat pod vodou (!), drží i při koupání, plavání a sprchování. **SPITA ResQ-plast** je velmi užitečná pro manuální profese ve vlhém a mokřem prostředí (zdravnictví, potravinářství, gastronomie apod.)


SPITA ResQ-plast lze použít:

- ✓ Zranění palců, prstů atd.
- ✓ Říznutí, odřeniny, tržné rány
- ✓ Miminka a malé děti (nelepí se na kůži)
- ✓ Puchýře
- ✓ Kompresní bandáže
- ✓ Poranění kloubů
- ✓ Natržený nehet
- ✓ Mokrou, špinavou nebo mastnou pokožku
- ✓ Zvířata / domácí mazlíčky (nelepí se na srst)

Instrukce k použití na špičku prstu:



Přetáhněte **SPITA ResQ-plast** přes špičku prstu.

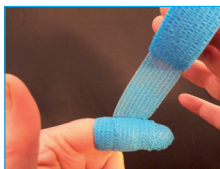

Omotote prst **SPITA ResQ-plastem** směrem zezadu dopředu.



Po 4-5 omotáních **SPITA ResQ-plast** odtrhněte a konec náplastí pevně přitiskněte.



Tento způsob je také vhodný pro ochranu prstů před ostrými předměty.

VAROVÁNÍ:

Jestliže je přípravek **SPITA ResQ-plast** utažený příliš těsně, může bránit krevnímu oběhu. Pokud se tak stane, náplast rozbalte a zabalte ji méně těsně.

TIP:

SPITA ResQ-plast má velmi dlouhou životnost. Uchovávejte přípravek **SPITA ResQ-plast** v ochranném blistru, aby nedošlo k jeho znečištění.

Rozměry:

"standard" : 25 mm (š) x 4,5 m (d)

"medium" : 50 mm (š) x 4,5 m (d)

K dispozici v následujících barvách:

Certifikováno pro lékařské použití:



Food & Drug
Administration
USA

ČERVENÁ

MODRÁ

TĚLOVÁ

ČERNÁ

MASKOVACÍ

NEONOVĚ RŮŽOVÁ

BÍLÁ

ZELENÁ



Unifleg CZ spol. s r.o.

Na Křečku 365, 109 04 Praha 10

tel.: +420 272 083 251, fax: +420 272 083 255

e-mail: unifleg@unifleg.cz

Další informace naleznete na našich
webových stránkách:

www.unifleg.cz

Ostatní produkty společnosti ResQ:



Tento produkt je poskytován bez záruky, ať již vyjádřené nebo předpokládané, na vhodnost pro určitý účel. Vzhledem k tomu, že podmínky a způsob použití jsou mimo kontrolu výrobce, ani výrobce, ani prodávající nenesou žádnou odpovědnost za používání nebo zneužití tohoto výrobku. **SPITA ResQ-plast** je ochrannou značkou společnosti G&G Investments B.V., Zeewolde (NL).

Powered by

